

FFP3




PAULA BERG
BJBG-6801 CE 2163
EN149:2001+A12009 FFP3 NR



FFP3NR

Mascarilla Autofiltrante / Particle Filtering Half Mask
 Masque De Protection / Máscara De Autofiltração

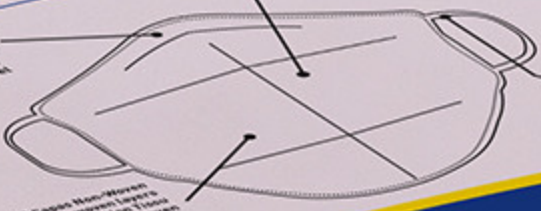

Pieza ajustable
 Adjustable nose clip
 Pinça ajustável
 Clip ajustável

Elásticos ajustables
 Adjustable straps
 Elásticos ajustables
 Elásticos ajustables

2 Capas Multilayers / 3 Capas Non-Wovens
 2 Multilayers layers / 3 Non-wovens layers
 2 Capas Multilayers / 3 Capas Non-Wovens
 2 Capas Multilayers / 3 Capas Non-Wovens

Material Eco-friendly
 Eco-friendly material
 Material Eco-friendly
 Material Eco-friendly




CE 2163
 EN149:2001+A1:2009
FFP3 NR
 NO MÉDICA / NON MEDICAL
 NON MEDICAL / NÃO MÉDICA
 MADE IN CHINA

PAULA BERG
 PURE AND HEALTHY

PAULA BERG
 PURE AND HEALTHY

FFP3NR

Mascarilla Autofiltrante / Particle Filtering Half Mask
 Masque De Protection / Máscara De Autofiltração

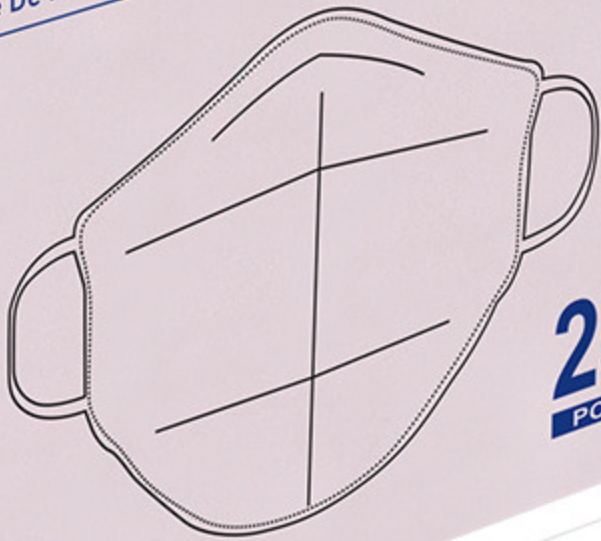

25
 PCS



CE 2163
 EN149:2001+A1:2009
FFP3 NR
 NO MÉDICA / NON MEDICAL
 NON MEDICAL / NÃO MÉDICA
 MADE IN CHINA

Mascarilla Autofiltrante / Particle Filtering Half Mask
 Masque De Protection / Máscara De Autofiltração

Modelo / Model / Modelo / Modelo: SP25-0901
 Modelo / Model / Modelo / Modelo: SP25-0901
 Tamanho / Size / Tamanho / Tamanho: 145 x 165 mm (L x A)
 Tamanho / Size / Tamanho / Tamanho: 145 x 165 mm (L x A)
 Temperatura de armazenamento / Storage temperature: 20 to 40°C (humidity 65%)
 Temperatura de uso / Use: 20 to 40°C (humidity 65%)
 Prazo de validade / Shelf life / Validity period: 2 years
 Prazo de validade / Shelf life / Validity period: 2 years
 Material / Material / Material / Material: Elastomeric (Silicone), ABS, Polypropylene, Non-Wovens
 Material / Material / Material / Material: Elastomeric (Silicone), ABS, Polypropylene, Non-Wovens
 Fabricado por / Manufactured by / Fabricado por / Fabricado por: PAULA BERG TECHNOLOGY CO., LTD.
 Fabricado por / Manufactured by / Fabricado por / Fabricado por: PAULA BERG TECHNOLOGY CO., LTD.
 Endereço / Address / Endereço / Endereço: Rua da Indústria, 200 - Jangren, City, Guangzhou, China
 Endereço / Address / Endereço / Endereço: Rua da Indústria, 200 - Jangren, City, Guangzhou, China
 Telefone / Phone / Telefone / Telefone: +86 20 8100 8888
 Telefone / Phone / Telefone / Telefone: +86 20 8100 8888
 E-mail / E-mail / E-mail / E-mail: paula@paula.com
 E-mail / E-mail / E-mail / E-mail: paula@paula.com
 País de fabricação / Manufacturing country / País de fabricação / País de fabricação: China
 País de fabricação / Manufacturing country / País de fabricação / País de fabricação: China

PAULA BERG


PURE AND HEALTHY

FFP3NR Mascarilla Autofiltrante / Particle Filtering Half Mask
Masque De Protection / Máscara De Autofiltração



Pinza ajustable
Adjustable nose clip
Pince ajustable
Clipe ajustável

Material Eco friendly
Eco friendly material
Matériel Éco-friendly
Material Eco friendly

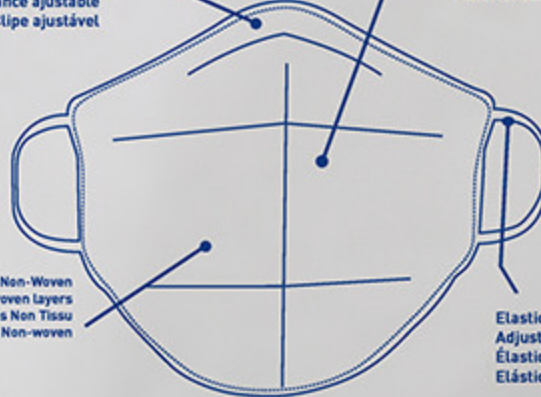

2 Capas Meltblown / 3 Capas Non-Woven
2 Meltblown layers / 3 Non-woven layers
2 Couches Meltblown / 3 Couches Non Tissu
2 Capas Meltblown / 3 Capas Non-woven

Elasticos ajustables
Adjustable elastics
Élastiques ajustables
Elásticos ajustáveis

¡UNA MEJOR PROTECCIÓN PARA TI! / IN ORDER TO BETTER PROTECT YOU!
POUR UNE MEILLEURE PROTECTION! / UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA SI!

- Alto grado de filtración / High filtration / Haute filtration / Alto grau de filtração
- Baja resistencia / Low resistance / Faible résistance / Baixa resistência
- Más ecológico / Closer to nature / plus écologique / Mais ecológico

FFP3NR

CE 2163

1/PC

Colocación de la mascarilla no médica
Installation of non-medical mask
Coloção da máscara não médica
Mise en place du masque non médical



Posicione la mascarilla cubriendo la nariz, boca y barbilla.

Position the mask on the nose and mouth including the chin.

Coloque a máscara no nariz e boca incluindo queixo.

Placer le masque sur la bouche, depuis le nez jusqu'au menton.



Sujetando la mascarilla, coloque los elásticos detrás de las orejas.

Hang the mask: pass the elastics behind the ears.

Prenda a máscara: passe o elástico por trás das orelhas.

Maintenir le masque et placer les élastiques derrière les oreilles.



Ajuste la pinza al contorno de la nariz presionando suavemente con dos dedos.

Shape the bar and adjust it to the contour of nose with your two fingers.

Ajuste o clip no contorno do nariz com os dois dedos.

Ajuster le pont nasal du bout des doigts autour de votre nez.



Selle la mascarilla: la nariz, boca y barbilla deben estar cubiertas.

Seal the mask: the nose, mouth and chin must be covered.

Sele a máscara: nariz, boca e queixo tem de estar coberta.

Vérifier le maintien du masque: le nez, la bouche et le menton doivent être couverts

FFP3NR **CE** 2163

Mascarilla Autofiltrante / Particle Filtering Half Mask
Masque De Protection / Máscara De Autofiltração

Modelo / Model / Modèle / Modelo: BJBG-6801

Medida / Size/ Taille / Tamanho: 10,5 x 15,5 cm (± 3mm)

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Uso: Desechable / Use: Disposable protective Utilisation: Jetable / Uso: Descartável

Temperatura de almacenaje / Storage temperature /

Température de stockage / Temperatura de armazenamento: -20° to +30° // Humidity < 80%

Fecha de caducidad: 2 años / Expire date: 2 years

Date d'expiration: 2 ans / Data de validade: 2 anos

Material / Material / Matériel / Material: Electrostatic Meltblown / Spunbound Non-Woven

Adaptador incluido

Adapteur inclus

Adaptateur inclus



Fabricado por / Produced by / Fabriqué par / Fabricado por:

GUANGDONG BAOJIABEIGE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No.14, Beach Wet, Zhoujun Village, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen City, Guangdong

Importado por / Imported by / Importé par / Importado por:

Goya Importaciones y Distribuciones S.L.

C/ Trapani 27 - Zaragoza (50197) / España

CIF: B50154293 - +0034 976 463 370

Número de lote / Batch number / Numéro de lot / Número do lote:

Fecha de fabricación / Manufacture date / Date de fabrication / Data de fabricação:

MADE IN CHINA



